

# Produktdatenblatt/Gebrauchsanweisung

## Medizinische Gesichtsmaske



### peppler premium soft® | 716WB

#### | Produktbeschreibung, Verwendungszweck und angewandte Normen

Medizinischer Mundschutz:

**weiß**, latexfrei, nickelfrei, nicht steril, 3-lagiges glasfaserfreies Filtermedium, mit Band.


<p><b>Medizinprodukt Klasse I</b> Gem. Verordnung (EU) 2017/745</p>


<p><b>Medizinische Gesichtsmaske Typ IIR</b></p>

Latexfrei	
Schutzbarriere zum Bedecken von Mund und Nase	

Nicht steril	
Nicht wiederverwenden / Zum einmaligen Gebrauch	

**Vertrieb durch**

Peppler GmbH  
Marburger Str. 251  
35396 Gießen

**Telefon**

DE: 0641 95205-99  
AT: 01 47017-06  
CH: 044 68804-81

**Web**

www.peppler.de  
www.peppler.at  
www.peppler-swiss.ch

**Praxishygiene. Einfach. Persönlich.**



## | Testergebnisse und physikalische Eigenschaften

<b>Dermatest®</b>	sehr gut	
<b>Gem. DIN EN 14683</b>	Bakterielle Filterleistung (BFE):	≥ 99 %
	Atmungsaktivität:	35.1 Pa/cm <sup>2</sup> - 45 Pa/cm <sup>2</sup>
	Spritzwiderstand:	bestanden
	Mikrobiologische Reinheit:	13 CFU/g - 16 CFU/g
<b>Material</b>	Außen:	Spunbond Polypropylen 25 g/m <sup>2</sup>
	Filtermaterial:	Melt-blown Polypropylen 25 g/m <sup>2</sup>
	Innen:	Spunbond Polypropylen 25 g/m <sup>2</sup>
	Band:	Spunbond Polypropylen
	Nasenbügel:	Aluminium
<b>Abmessungen</b>	Maske:	Länge: 175 mm (± 3 mm) Breite: 95 mm (± 3 mm)
	Band:	Länge: 895 mm (± 10 mm)
	Nasenbügel:	Länge: 110 mm (± 10 mm)



## | Information, Achtung und Gebrauchsanweisung

**Bitte prüfen Sie den Mundschutz vor der Anwendung auf Tauglichkeit. Beschädigtes Produkt nicht verwenden.** Ein medizinischer Mundschutz stellt eine Schutzbarriere zum Bedecken von Mund und Nase dar, um die direkte Übertragung infektiöser Keime zwischen Personal und Patient zu minimieren.

Bei korrektem Tragen reduziert dieser Mundschutz die Exposition gegenüber Blut und Körperflüssigkeiten und minimiert die Kontamination des Patienten durch ausgeatmete Mikroorganismen. Dieses Produkt ist keine Atemschutzmaske und verhindert nicht die Exposition gegenüber oder das Risiko von Krankheiten oder Infektionen.

Wenn eine Gefahr für die Atemwege vorliegt oder vermutet wird, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten. Wechseln Sie sofort den Mundschutz und entsorgen ihn ordnungsgemäß, wenn der Mundschutz beschädigt oder mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminiert ist. **Nur für die einmalige Verwendung bestimmt.**

### Vertrieb durch

Peppler GmbH  
Marburger Str. 251  
35396 Gießen

### Telefon

DE: 0641 95205-99  
AT: 01 47017-06  
CH: 044 68804-81

### Web

www.peppler.de  
www.peppler.at  
www.peppler-swiss.ch

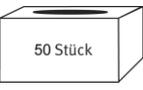
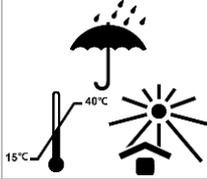
Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

**peppler.de**

## Anwendung

Mundschutz über Nase, Mund und Kinnbereich legen und mittels Nasensteg an Gesichtsform anpassen. Mit den Bändern auf der Kopfrückseite fixieren.

## | Lagerung, Entsorgung und Produktdetails

<b>Herstellungsland</b>	China	
<b>Haltbarkeit ab Herstellungsdatum</b>	5 Jahre	
<b>Inhalt</b>	50 Stück pro Spenderbox 40 Spenderboxen pro Transportkarton	
<b>Lagerung</b>	Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern, keine übermäßige Hitze und Sonneneinstrahlung. Lagerung unter 40°C.	
<b>Entsorgungshinweis</b>	Entsprechend den gültigen Vorschriften entsorgen.	

| Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

## Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

### Telefon:

DE: 0641 95205-99

AT: 01 47017-06

CH: 044 688 04-81

### E-Mail:

[info@peppler.de](mailto:info@peppler.de)

[info@peppler.at](mailto:info@peppler.at)

[info@peppler-swiss.ch](mailto:info@peppler-swiss.ch)



### Vertrieb durch

Peppler GmbH  
Marburger Str. 251  
35396 Gießen

### Telefon

DE: 0641 95205-99  
AT: 01 47017-06  
CH: 044 68804-81

### Web

[www.peppler.de](http://www.peppler.de)  
[www.peppler.at](http://www.peppler.at)  
[www.peppler-swiss.ch](http://www.peppler-swiss.ch)

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

**peppler.de**