

Produktdatenblatt/Gebrauchsanweisung

Instrumentendesinfektion



Micro Comb® | 3800

| Produktbeschreibung

Micro Comb® ist ein aldehyd- und phenolfreies Instrumentendesinfektionsmittelkonzentrat zur Aufbereitung von chirurgischen Instrumentarien, sowie thermolabilem Anästhesiezubehör und starren Endoskopen im Einlegeverfahren oder im Ultraschallbad. Ebenfalls geeignet für Bohrer bzw. rotierende Instrumente.

| Anwendungsbereich

Für alle Anwendungsbereiche, in denen ärztliches Instrumentarium im Einlegeverfahren oder im Ultraschallbad aufbereitet wird. Micro Comb® ist nicht für die Abschlussdesinfektion semikritischer Instrumente geeignet.

| Anwendung

Einlegeverfahren

Instrumente nach erfolgter Reinigung einlegen. Sämtliche Oberflächen und Hohlräume müssen bedeckt bzw. gefüllt sein. Die Anwendungskonzentration und Einwirkzeiten bitte beachten. Instrumente entnehmen, gründlich mit Wasser Abspülen und trocknen. Beachten Sie die Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (in Deutschland: RKI, KRINKO, MPBetreibV). Beachten Sie die Hinweise der Instrumenten- und Gerätehersteller.

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de

Ultraschallanwendung

Analog Einlegeverfahren. Beachten Sie bitte die für die Ultraschallanwendung vorgegebenen Einwirkzeiten. Beachten Sie die Hinweise der Instrumenten- und Grätehersteller.

Produktwechsel

Micro Comb® ist mit aldehydhaltigen Desinfektionsmitteln nicht kompatibel. Beim Ersteinsatz und Produktwechsel sind die Instrumente und das Zubehör, die Wannen, die Aufbereitungsgeräte sowie Applikationshilfen gründlich zu reinigen und zu spülen. Die Micro Comb® Gebrauchslösung ist eiweißbelastbar und kann ggf. mehrfach genutzt werden. Bei Eintrübungen oder sichtbaren Verschmutzungen wird empfohlen, die Gebrauchslösung zu erneuern. Nur für den professionellen Gebrauch.

| Wirkspektrum & Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Konz.	Einwirkzeit
Bakterizid, levurozid nach EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562	3 %	15 min. (niedrige Belastung)
Tuberkulozid (<i>M. terrae</i>) nach EN 14348, EN 14563	3 %	15 min. (niedrige Belastung)
Begrenzt viruzid (Vaccinia Elstree, BVDV) nach RKI/ DVV	3 %	15 min. (in 10 % FKS)
Begrenzt viruzid (MVA) nach EN 14476	1 %	15 min. (niedrige Belastung)
Instrumentendesinfektion im Ultraschallbad	3 %	5 min. (hohe Belastung)

| Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:

5 g Alkyldimethylethylammoniummethylsulfat

1 g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid

1,8 g Cocospropylenguanidiniumdiacetat

| Medizinproduktklasse

IIb

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de

| Lagerung & Haltbarkeit

Haltbarkeit ungeöffnet | 3 Jahre ab Produktionsdatum

Haltbarkeit nach Anbruch | 12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

| Produktsortiment & Spezifikation

Artikelnummer	Gebindegröße	Gebindeart	Verpackungseinheit
3800	10 l	Kanister	1 x 10 l
3800A	1 l	Dosierflasche	1 x 1 l

| Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
002	Auslaufhahn
006	Kanisterschlüssel
3407	Dosierpumpe für 5 L Kanister

| Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon:

DE: 0641 95205-99

AT: 01 47017-06

CH: 044 688 04-81

E-Mail:

info@peppler.de

info@peppler.at

info@peppler-swiss.ch



Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de