


Produktdatenblatt/Gebrauchsanweisung

Medizinische Gesichtsmaske

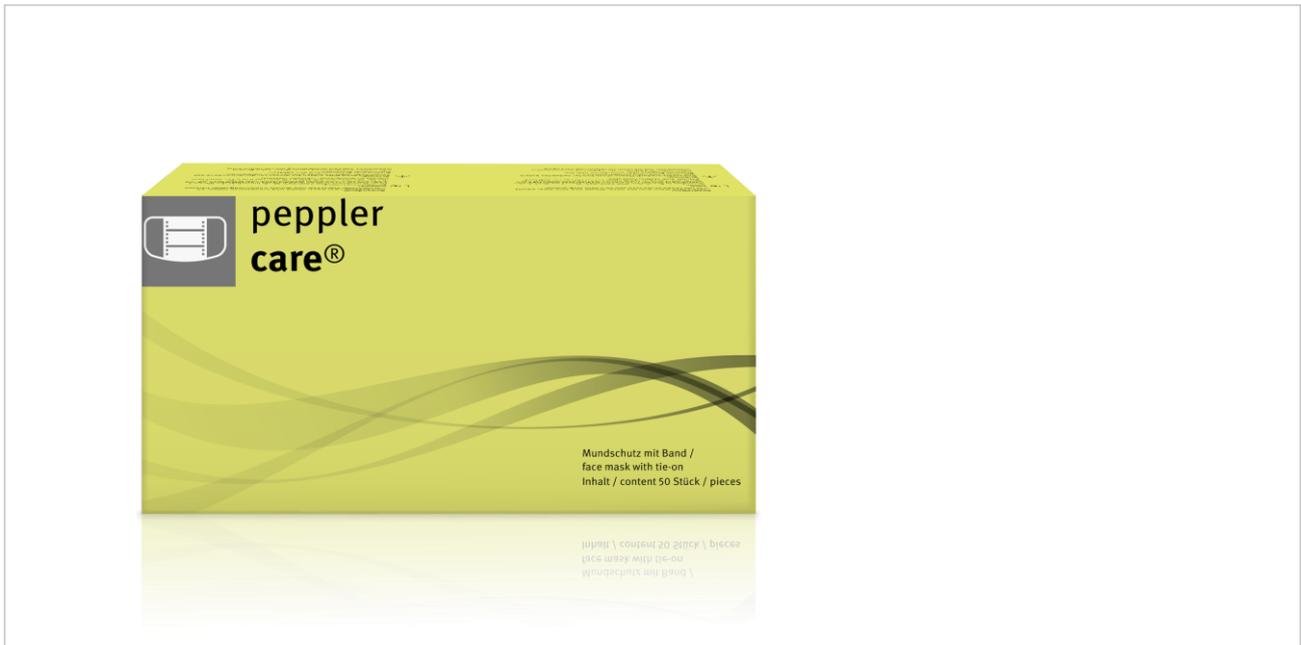

peppler care® | N770B

| Produktbeschreibung, Verwendungszweck und angewandte Normen

Medizinischer Mundschutz:

blau, mint, lila, rosa, weiß, latexfrei, nickelfrei, nicht steril, 3-lagiges glasfaserfreies Filtermedium, mit Band.

MD
Medizinprodukt Klasse I Gem. Verordnung (EU) 2017/745

CE
Medizinische Gesichtsmaske Typ IIR

Latexfrei	
Schutzbarriere zum Bedecken von Mund und Nase	

Nicht steril	
Nicht wiederverwenden / Zum einmaligen Gebrauch	

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.



| Testergebnisse und physikalische Eigenschaften

DermaTest®	sehr gut	
Gem. DIN EN 14683	Bakterielle Filterleistung (BFE):	≥ 99 %
	Atmungsaktivität:	36.2 Pa/cm ² - 40.8 Pa/cm ²
	Spritzwiderstand:	bestanden
	Mikrobiologische Reinheit:	bestanden
Material	Außen:	Polypropylen Vlies 34 g/m ²
	Filtermaterial:	Melt-blown Vlies 25 g/m ²
	Innen:	Polypropylen Vlies 14 g/m ²
	Band:	Polypropylen Vlies 40 g/m ²
	Nasenbügel:	Polyethylen beschichteter Draht
Abmessungen	Maske:	Länge: 175 mm (± 5 mm) Breite: 90 mm (± 5 mm)
	Band:	Länge: 960 mm (± 25 mm)
	Nasenbügel:	Länge: 125 mm (± 5 mm)



| Information, Achtung und Gebrauchsanweisung

Bitte prüfen Sie den Mundschutz vor der Anwendung auf Tauglichkeit. Beschädigtes Produkt nicht verwenden. Ein medizinischer Mundschutz stellt eine Schutzbarriere zum Bedecken von Mund und Nase dar, um die direkte Übertragung infektiöser Keime zwischen Personal und Patient zu minimieren.

Bei korrektem Tragen reduziert dieser Mundschutz die Exposition gegenüber Blut und Körperflüssigkeiten und minimiert die Kontamination des Patienten durch ausgeatmete Mikroorganismen. Dieses Produkt ist keine Atemschutzmaske und verhindert nicht die Exposition gegenüber oder das Risiko von Krankheiten oder Infektionen.

Wenn eine Gefahr für die Atemwege vorliegt oder vermutet wird, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten.

Wechseln Sie sofort den Mundschutz und entsorgen ihn ordnungsgemäß, wenn der Mundschutz beschädigt oder mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminiert ist. **Nur für die einmalige Verwendung bestimmt.**

Anwendung

Mundschutz über Nase, Mund und Kinnbereich legen und mittels Nasensteg an Gesichtsform anpassen. Mit den Bändern auf der Kopfrückseite fixieren.

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81


Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de

| Lagerung, Entsorgung und Produktdetails

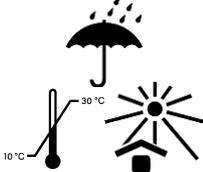Herstellungsland	Thailand	
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	5 Jahre	
Inhalt	50 Stück pro Spenderbox 50 Spenderboxen pro Transportkarton	
Lagerung	Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern, keine übermäßige Hitze und Sonneneinstrahlung. Lagerung bei 10-30°C.	
Entsorgungshinweis	Entsprechend den gültigen Vorschriften entsorgen.	
REF	blau N770BB mint N770GB lila N770LB	rosa N770PB weiß N770WB

| Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon:

DE: 0641 95205-99

AT: 01 47017-06

CH: 044 688 04-81

E-Mail:

info@peppler.de

info@peppler.at

info@peppler-swiss.ch



Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de