

Produktdatenblatt/Gebrauchsanweisung

Instrumentendesinfektion



instru pep® | 3900

| Produktbeschreibung

Aldehydfreies Konzentrat zur manuellen Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von medizinischen Instrumenten und aufbereitbaren Medizinprodukten. Besonders materialschonend und zur Anwendung im Ultraschallbad geeignet.

| Anwendungsbereich

Geeignet für (zahn)ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste sowie Fußpflege-, Kosmetik- und Tattoo-Studios. Nur für professionelle Anwender. Auch zur Anwendung im Ultraschallbad bei Raumtemperatur geeignet. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten! Mit Enzymen.

| Anwendung

Das Konzentrat mit 10°C bis 30°C warmem Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) verdünnen (Dosierflasche oder Dosiergerät verwenden).

Bei starken Verunreinigungen zuvor die für eine Tauchbadesinfektion geeigneten Medizinprodukte mechanisch reinigen und - falls möglich - in geöffnetem Zustand in die Gebrauchslösung einlegen. Sämtliche

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de

zu desinfizierenden Oberflächen und Hohlräume müssen von der Gebrauchslösung vollständig benetzt sein. Je nach Verschmutzungsgrad ist die Gebrauchslösung zu erneuern (RKI-Empfehlung: Mindestens arbeitstäglich). Nach Ablauf der Einwirkzeit das Desinfektionsgut gründlich mit bevorzugt demineralisiertem Wasser abspülen und trocknen. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen! Aufbereitungsempfehlungen von Instrumentenhersteller sind zu beachten.

Sehr gute Materialverträglichkeit mit allen gängigen Instrumentenmaterialien (z.B. Edelstähle, Stähle, Gummi, diamantbelegte Bohrer, diverse Kunststoffe wie PMMA, POM, EDPM). Beim Einsatz neuer Materialien ist vorab trotzdem die Verträglichkeit zu überprüfen.

Die Gebrauchslösung kann über das Abwasser entsorgt werden. Dosiermengen und Einwirkzeiten sollten genau eingehalten und nicht unterschritten werden. Überdosierungen sollten aus Umweltschutz- und Materialverträglichkeitsgründen ebenfalls vermieden werden.

| Wirkspektrum & Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Konz.	Einwirkzeit
Bakterizid, levurozid nach EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, VAH	2 % 1,5 % 1 %	5 min. 15 min. 60 mn. (hohe Belastung)
Tuberkulozid/ Mykobakterizid (<i>M. terrae</i> , <i>M. avium</i>) nach EN 14348, EN 14563	4 % 3 %	30 min. 60 min. (niedrige Belastung)
Begrenzt viruzid (Vaccinia Elstree, BVDV Stamm NADL) nach RKI/ DVV, EN 14476, EN 17111	1,5 %	15 min. (hohe Belastung)
Viruzid wirksam gegen Polyomavirus SV40 nach EN 14476	4 %	60 min. (niedrige Belastung)
Bakterien und Candida albicans im Ultraschallbad nach EN 14561 und EN 14562	1 %	5 min. (hohe Belastung)

| Zusammensetzung

VO 648/2004/EG:

Enthält 5-15% nichtionische Tenside, <5% kationische Tenside, <5% EDTA-Salze, Duftstoffe, Enzyme

| Medizinproduktklasse

IIb

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de

| Lagerung & Haltbarkeit

Haltbarkeit ungeöffnet | 3,5 Jahre ab Produktionsdatum

Haltbarkeit nach Anbruch | 12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

| Produktsortiment & Spezifikation

Artikelnummer	Gebindegröße	Gebindeart	Verpackungseinheit
3900	5 l	Kanister	1 x 5 l
3900A	1 l	Dosierflasche	26 x 1 l

| Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
002	Auslaufhahn
006	Kanisterschlüssel
3407	Dosierpumpe für 5 L Kanister

| Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon:

DE: 0641 95205-99

AT: 01 47017-06

CH: 044 688 04-81

E-Mail:

info@peppler.de

info@peppler.at

info@peppler-swiss.ch



Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de