



Informationsblatt Alginate



Information für die Alginate Clip align und Cromatic

Die Alginate Clip align und Cromatic erhalten sie in Beuteln à 453 g.

Die korrekte Dosierung für die Abformung lautet wie folgt:

Für die Abformung eines Kieferbogens verwenden Sie 1 Messlöffel Wasser (21 ml = kleiner Messlöffel) und 1 Messlöffel Alginat-Pulver (10 g = großer Messlöffel).

Für die Abformung von zwei Kieferbögen verwenden Sie 2 Messlöffel Wasser (42 ml = kleiner Messlöffel) und 2 Messlöffel Alginat-Pulver (20 g = großer Messlöffel).

Bei der Dosierung ist es sehr wichtig, dass das Pulver nicht festgedrückt wird. Der Messlöffel muss gefüllt und dann mit Hilfe eines Spatels glattgestrichen werden.

Die Temperatur des verwendeten Wassers ist ebenfalls sehr wichtig! Wenn das Alginat mit sehr heißem Wasser gemischt wird, verkürzt sich die Mischzeit drastisch. Wenn sehr kaltes Wasser verwendet wird, verlängert sich die Mischzeit. **Ideal ist die Verwendung von Wasser mit Raumtemperatur (23°C).**

Nach der Abformung muss der Abdruck **unter fließendem Wasser abgewaschen werden**, um Rückstände zu entfernen. Anschließend wird der Abdruck gemäß den Anweisungen des Desinfektionsmittelherstellers **desinfiziert**. Nach der Einwirkzeit muss der Abdruck **erneut abgespült und getrocknet** werden.

Wenn es nicht möglich ist, sofort mit dem Ausgießen fortzufahren, legen Sie den Abdruck in einen hermetisch verschlossenen Beutel mit einem feuchten (nicht nassen) Baumwolltuch/Watte, um eine **gute Luftfeuchtigkeit** zu erhalten. Der Abdruck darf nicht in Wasser getaucht werden!

Wichtig: Der Abdruck muss im Abdrucklöffel bleiben.

Bewahren Sie den Beutel für **maximal 5 Tage** an einem kühlen und trockenen Ort auf. Wenn die Umgebungstemperatur 27°C übersteigt, legen Sie den Beutel in den Kühlschrank.

**Vertrieb durch
Pepler GmbH**

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen
Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06
www.pepler.de

**Hersteller
VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.**

Via di Campigliano 55/A- 50012 • GRASSINA (FI) ITALY
Tel. +39055/644698 • Fax +39055/644697
info@vanninidental.com
www.vanninidental.com