

# Produktdatenblatt/Gebrauchsanweisung

## Oberflächendesinfektion



## Micro Clean Pro® | 912

### | Produktbeschreibung

Micro Clean Pro® ist ein flüssiges, gebrauchsfertiges, alkoholisches Desinfektionsmittel zur Oberflächendesinfektion mit und ohne Mechanik.

### | Anwendungsbereich

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, (Zahnarzt-)Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen sowie in der Industrie, öffentlichen Einrichtungen und der häuslichen Pflege. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten. Das Produkt zeigt eine sehr gute Materialverträglichkeit unter den vorgegebenen Einwirkzeiten. Bei alkoholunbeständigen Flächen wie Acrylglas und Polycarbonat kann es zu optischen Veränderungen, wie schwachen Trübungsspuren bzw. matt glänzenden Veränderungen kommen.

### | Anwendung

Beachten Sie die im medizinischen Umfeld geltenden, besonderen Anforderungen an die Hygiene bei der Desinfektion von Flächen (in Deutschland: die Empfehlung der KRINKO zum Thema Flächendesinfektion, oder die Empfehlungen des VAH bei routinemäßiger Desinfektion). Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Das gebrauchsfertige Produkt kann im Sprühverfahren (ohne Mechanik), vorzugsweise im

#### Vertrieb durch

Peppler GmbH  
Marburger Str. 251  
35396 Gießen

#### Telefon

DE: 0641 95205-99  
AT: 01 47017-06  
CH: 044 68804-81

#### Web

www.peppler.de  
www.peppler.at  
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

**peppler.de**

Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs/ Mopps (mit Mechanik), oder in einer Kombination aus Sprüh-/ Wischverfahren (mit Mechanik) verwendet werden. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Fläche feucht halten. Die Flüssigkeitsmenge, die auf die Oberfläche aufgebracht werden muss, ist abhängig von Oberflächenbeschaffenheit, Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchte.

## | Wirkspektrum & Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Einwirkzeit
<b>Oberflächendesinfektion MIT Mechanik (Tuch in Kombination mit der Tränklösung nach VAH EN 16615/ *modified EN 16615)</b>	
<b>Bakterizid, levurozid</b> (hohe Belastung)	1 min.
<b>mykobakterizid</b> ( <i>M. terrae</i> , <i>M. avium</i> ) (hohe Belastung)	2 min.
<b>begrenzt viruzid*</b> (niedrige Belastung)	1 min.
<b>Oberflächendesinfektion OHNE Mechanik (Tränklösung)</b>	
<b>bakterizid/levurozid</b> (hohe Belastung)	1 min.
<b>mykobakterizid</b> ( <i>M. terrae</i> , <i>M. avium</i> ) (hohe Belastung)	2 min.
<b>begrenzt viruzid PLUS</b> (niedrige Belastung)	30 min.**
<b>viruzid</b> wirksam gegen Polyoma SV40 (niedrige Belastung)	5 min.

\*\* nicht für patientennahe Oberflächen

## | Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:

20 g 1-Propanol

0,2 g Benzalkoniumchlorid

### Vertrieb durch

Peppler GmbH  
Marburger Str. 251  
35396 Gießen

### Telefon

DE: 0641 95205-99  
AT: 01 47017-06  
CH: 044 68804-81

### Web

www.peppler.de  
www.peppler.at  
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

**peppler.de**

## | Medizinprodukt

Medizinproduktklasse
IIa

## | Lagerung & Haltbarkeit

**Haltbarkeit ungeöffnet** | 3 Jahre ab Produktionsdatum

**Haltbarkeit nach Anbruch** | 12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## | Produktsortiment & Spezifikation

Artikelnummer	Gebindegröße	Gebindeart	Verpackungseinheit
912	5 L	Kanister	1 x 5 L
912COTTON	5 L	Kanister	1 x 5 L
912EXTRA	5 L	Kanister	1 x 5 L
912MELON	5 L	Kanister	1 x 5 L
912SPORT	5 L	Kanister	1 x 5 L
912SUNRISE	5 L	Kanister	1 x 5 L
912A	1 L	Sprühflasche	12 x 1 L
912ACOTTON	1 L	Sprühflasche	12 x 1 L
912AEXTRA	1 L	Sprühflasche	12 x 1 L
912AMELON	1 L	Sprühflasche	12 x 1 L
912ASPORT	1 L	Sprühflasche	12 x 1 L
912ASUNRISE	1 L	Sprühflasche	12 x 1 L

### Vertrieb durch

Peppler GmbH  
Marburger Str. 251  
35396 Gießen

### Telefon

DE: 0641 95205-99  
AT: 01 47017-06  
CH: 044 68804-81

### Web

[www.peppler.de](http://www.peppler.de)  
[www.peppler.at](http://www.peppler.at)  
[www.peppler-swiss.ch](http://www.peppler-swiss.ch)

**Praxishygiene. Einfach. Persönlich.**

**peppler.de**

## | Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
002	Auslaufhahn
006	Kanisterschlüssel
900S	Sprühkopf
3407	Dosierpumpe
3409	Kippaufsatz für 1 L Flasche

| Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

### Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

**Telefon:****DE: 0641 95205-99****AT: 01 47017-06****CH: 044 688 04-81****E-Mail:**[info@peppler.de](mailto:info@peppler.de)[info@peppler.at](mailto:info@peppler.at)[info@peppler-swiss.ch](mailto:info@peppler-swiss.ch)**Vertrieb durch**

Peppler GmbH  
Marburger Str. 251  
35396 Gießen

**Telefon**

DE: 0641 95205-99  
AT: 01 47017-06  
CH: 044 68804-81

**Web**

[www.peppler.de](http://www.peppler.de)  
[www.peppler.at](http://www.peppler.at)  
[www.peppler-swiss.ch](http://www.peppler-swiss.ch)

**Praxishygiene. Einfach. Persönlich.**

**peppler.de**