

Produktdatenblatt/Gebrauchsanweisung

Medizinische Gesichtsmaske



peppler flowers | 718FLOWERS

| Produktbeschreibung, Verwendungszweck und angewandte Normen

Medizinischer Mundschutz:

Motiv Flowers, latexfrei, nickelfrei, nicht steril, 3-lagiges glasfaserfreies Filtermedium, rundes Schlaufengummi.

 Medizinprodukt Klasse I Gem. Verordnung (EU) 2017/745		 Medizinische Gesichtsmaske Typ IIR	
Latexfrei		Nicht steril	
Schutzbarriere zum Bedecken von Mund und Nase		Nicht wiederverwenden / Zum einmaligen Gebrauch	

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de

| Testergebnisse und physikalische Eigenschaften

Gem. DIN EN 14683	Bakterielle Filterleistung (BFE):	≥ 98 %
	Atmungsaktivität:	< 60 Pa/cm ²
	Spritzwiderstand:	bestanden
	Mikrobiologische Reinheit:	≤ 30 CFU/g
Material	Außen:	PET 45 g/m ²
	Filtermaterial:	Melt-blown Polypropylen 25 g/m ²
	Innen:	Spunbond Polypropylen 25 g/m ²
	Schlaufengummi:	elastische Polyester-Faser (latexfrei)
	Nasenbügel:	Aluminium-Draht (nickelfrei)
Abmessungen	Maske:	Länge: 175 mm (± 3 mm) Breite: 95 mm (± 3 mm)
	Schlaufengummi:	Länge: 170 mm (± 10 mm)
	Nasenbügel:	Länge: 110 mm (± 10 mm)



| Information, Achtung und Gebrauchsanweisung

Bitte prüfen Sie den Mundschutz vor der Anwendung auf Tauglichkeit. Beschädigtes Produkt nicht verwenden. Ein medizinischer Mundschutz stellt eine Schutzbarriere zum Bedecken von Mund und Nase dar, um die direkte Übertragung infektiöser Keime zwischen Personal und Patient zu minimieren.

Bei korrektem Tragen reduziert dieser Mundschutz die Exposition gegenüber Blut und Körperflüssigkeiten und minimiert die Kontamination des Patienten durch ausgeatmete Mikroorganismen. Dieses Produkt ist keine Atemschutzmaske und verhindert nicht die Exposition gegenüber oder das Risiko von Krankheiten oder Infektionen.

Wenn eine Gefahr für die Atemwege vorliegt oder vermutet wird, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten.

Wechseln Sie sofort den Mundschutz und entsorgen ihn ordnungsgemäß, wenn der Mundschutz beschädigt oder mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminiert ist. **Nur für die einmalige Verwendung bestimmt.**

Anwendung

Mundschutz über Nase, Mund und Kinnbereich legen und mittels Nasensteg an Gesichtsform anpassen.

Mit dem Schlaufengummi hinter den Ohren fixieren.

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de

| Lagerung, Entsorgung und Produktdetails

Herstellungsland	China	
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	5 Jahre	
Inhalt	50 Stück pro Spenderbox 40 Spenderboxen pro Transportkarton	
Lagerung	Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern, keine übermäßige Hitze und Sonneneinstrahlung. Lagerung unter 40°C.	
Entsorgungshinweis	Entsprechend den gültigen Vorschriften entsorgen.	

| Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon:

DE: 0641 95205-99

AT: 01 47017-06

CH: 044 688 04-81

E-Mail:

info@peppler.de

info@peppler.at

info@peppler-swiss.ch



Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de