

# Produktdatenblatt/Gebrauchsanweisung

## Medizinische Gesichtsmaske



### peppler „I Love Smile“ | 718SMILE

#### | Produktbeschreibung, Verwendungszweck und angewandte Normen

Medizinischer Mundschutz:

**drei verschiedene Designs im Set: Smily-Katze, Smily-Hase, Smily-Mund**, latexfrei, nickelfrei, nicht steril, 3-lagiges glasfaserfreies Filtermedium, rundes Schlaufengummi.

 Medizinprodukt Klasse I Gem. Verordnung (EU) 2017/745		 Medizinische Gesichtsmaske Typ IIR	
Latexfrei		Nicht steril	
Schutzbarriere zum Bedecken von Mund und Nase		Nicht wiederverwenden / Zum einmaligen Gebrauch	

**Vertrieb durch**

Peppler GmbH  
Marburger Str. 251  
35396 Gießen

**Telefon**

DE: 0641 95205-99  
AT: 01 47017-06  
CH: 044 68804-81

**Web**

[www.peppler.de](http://www.peppler.de)  
[www.peppler.at](http://www.peppler.at)  
[www.peppler-swiss.ch](http://www.peppler-swiss.ch)

**Praxishygiene. Einfach. Persönlich.**

**peppler.de**

## | Testergebnisse und physikalische Eigenschaften

<b>Gem. DIN EN 14683</b>	Bakterielle Filterleistung (BFE):	≥ 98 %
	Atmungsaktivität:	< 60 Pa/cm <sup>2</sup>
	Spritzwiderstand:	bestanden
	Mikrobiologische Reinheit:	≤ 30 CFU/g
<b>Material</b>	Außen:	PET 45 g/m <sup>2</sup>
	Filtermaterial:	Melt-blown Polypropylen 25 g/m <sup>2</sup>
	Innen:	Spunbond Polypropylen 25 g/m <sup>2</sup>
	Schlaufengummi:	elastische Polyester-Faser (latexfrei)
	Nasenbügel:	Aluminium-Draht (nickelfrei)
<b>Abmessungen</b>	Maske:	Länge: 175 mm (± 3 mm) Breite: 95 mm (± 3 mm)
	Schlaufengummi:	Länge: 170 mm (± 10 mm)
	Nasenbügel:	Länge: 110 mm (± 10 mm)



## | Information, Achtung und Gebrauchsanweisung

**Bitte prüfen Sie den Mundschutz vor der Anwendung auf Tauglichkeit. Beschädigtes Produkt nicht verwenden.** Ein medizinischer Mundschutz stellt eine Schutzbarriere zum Bedecken von Mund und Nase dar, um die direkte Übertragung infektiöser Keime zwischen Personal und Patient zu minimieren.

Bei korrektem Tragen reduziert dieser Mundschutz die Exposition gegenüber Blut und Körperflüssigkeiten und minimiert die Kontamination des Patienten durch ausgeatmete Mikroorganismen. Dieses Produkt ist keine Atemschutzmaske und verhindert nicht die Exposition gegenüber oder das Risiko von Krankheiten oder Infektionen.

Wenn eine Gefahr für die Atemwege vorliegt oder vermutet wird, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten.

Wechseln Sie sofort den Mundschutz und entsorgen ihn ordnungsgemäß, wenn der Mundschutz beschädigt oder mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminiert ist. **Nur für die einmalige Verwendung bestimmt.**

### Anwendung

Mundschutz über Nase, Mund und Kinnbereich legen und mittels Nasensteg an Gesichtsform anpassen.

Mit dem Schlaufengummi hinter den Ohren fixieren.

#### Vertrieb durch

Peppler GmbH  
Marburger Str. 251  
35396 Gießen

#### Telefon

DE: 0641 95205-99  
AT: 01 47017-06  
CH: 044 68804-81

#### Web

[www.peppler.de](http://www.peppler.de)  
[www.peppler.at](http://www.peppler.at)  
[www.peppler-swiss.ch](http://www.peppler-swiss.ch)

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

**peppler.de**

## | Lagerung, Entsorgung und Produktdetails

<b>Herstellungsland</b>	China	
<b>Haltbarkeit ab Herstellungsdatum</b>	5 Jahre	
<b>Inhalt</b>	50 Stück pro Spenderbox 40 Spenderboxen pro Transportkarton	
<b>Lagerung</b>	Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern, keine übermäßige Hitze und Sonneneinstrahlung. Lagerung unter 40°C.	
<b>Entsorgungshinweis</b>	Entsprechend den gültigen Vorschriften entsorgen.	

| Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

### Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

#### Telefon:

**DE: 0641 95205-99**

**AT: 01 47017-06**

**CH: 044 688 04-81**

#### E-Mail:

[info@peppler.de](mailto:info@peppler.de)

[info@peppler.at](mailto:info@peppler.at)

[info@peppler-swiss.ch](mailto:info@peppler-swiss.ch)



#### Vertrieb durch

Peppler GmbH  
Marburger Str. 251  
35396 Gießen

#### Telefon

DE: 0641 95205-99  
AT: 01 47017-06  
CH: 044 68804-81

#### Web

[www.peppler.de](http://www.peppler.de)  
[www.peppler.at](http://www.peppler.at)  
[www.peppler-swiss.ch](http://www.peppler-swiss.ch)

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

**peppler.de**